

モアスキャン

ワ ン ポ イ ン ト

アドバイス

- 粒子が $0.45\mu\text{m}$ と大変細かい為、粒子同士がくつき易く、塊になり易いため、使用前は、容器をしっかりと振ってからご使用下さい。扇状に振っていただきますと粒子の塊を簡単に砕くことができます。
- また使用後は目詰まり防止の為、容器を逆さにして1噴射して頂くことをお勧めいたします。



モアスキャン専用ノズル

ノズルを付けて使っていただくことで、よりピンポイントに対象物に噴霧することができるためより均一にスプレーすることができ、コスト削減にもつながります。