

## う蝕活動性試験

# CAT21Test 集団用 100入



### 包装内容

- 使用説明書 1枚
- テストアンプル 100本  
(25本×4包装)
- 綿棒 100本  
(10本×10袋)
- ネームシール 100枚  
(10枚×10シート)
- 判定色見本 1枚

定価 16,700円

## ご使用方法

1. ネームシールに患者の氏名を記入し、アンプルに貼付します。貼付の際にはアンプル内の試験液が見えるようにご注意ください。
2. CAT21 綿棒で上顎全歯頬側面を数回めぐり、歯垢を採取します。
3. 歯垢を採取した CAT21 綿棒を CAT21 アンプルに投入し、培養器に入れ培養します。(培養温度 37°C±2°C)
4. 48 時間後に CAT21 アンプルの色を判定します。

※ご注文数量に応じて、納品まで 2～3 カ月お時間いただく場合もあります。あらかじめご了承ください。



〒530-0046 大阪市北区善原町10-32 DAIX西天満ビル 7F  
Tel-06-6367-0073 Fax-06-6367-0076