

# シーエーティ-21 テスト 集団用100入

## 包装内容

定価 24,000 円

- 使用説明書 1 枚
- テストサンプル 100 本 (25 本 × 4 包装)
- 綿棒 100 本 (10 本 × 10 袋)
- ネームシール 100 枚 (10 枚 × 10 シート)
- 判定色見本 1 枚



## ご使用方法

1. ネームシールに患者の氏名を記入し、アンプルに貼付します。貼付の際にはアンプル内の試験液が見えるようにご注意ください。
2. 付属の綿棒で上顎全歯頬側面を数回ぬぐい、歯垢を採取します。
3. 歯垢を採取した綿棒をアンプルに投入し、培養器に入れ、培養します。(培養温度 37±2℃)
4. 培養開始から 48 時間後にアンプル液の色を判定色見本を使って判定します。

## 保管方法

冷暗所にて保管してください。冷暗所が15度を超える場合は、冷蔵庫保管(凍結注意)をお願いします。開封後は必ずアルミ袋に戻して保管してください。